

Cómo recolectar y enviar su muestra de saliva



Obtenga la muestra

- **No coma, beba, fume ni mastique goma de mascar 30 minutos antes de recolectar su muestra.**
- Estimule su producción de saliva: frótese las mejillas, haga como si estuviera masticando goma de mascar o huela un limón.
- Siga las instrucciones en el interior del envase plástico.
- **Cierre bien el tubo y deseche la tapa del embudo y la bandeja.**
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente.



Escanee el código QR para acceder a un video tutorial.




Complete la documentación

- **Tubo de muestra:** Indique nombre, fecha de nacimiento y fecha de obtención de la muestra.
- **Formulario de solicitud de prueba (Test Request Form/TRF):** Escriba la fecha de recolección de la muestra.



Empaque todo

- Coloque el formulario de solicitud de prueba (TRF) en la caja de MyRisk.
- Coloque el tubo en la bolsa para material de riesgo biológico y séllela.
- Coloque la bolsa para material de riesgo biológico en la caja de MyRisk.
- Coloque la caja de MyRisk en el sobre de envío y séllelo.

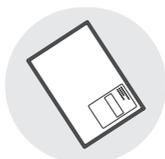

Envíe la muestra dentro de un plazo de 1 a 2 días después de obtenerla

FedEx®

Deposite el sobre con la dirección de envío preimpresa en cualquier centro FedEx.

Servicio Postal de los EE. UU. (USPS)

Para realizar el envío a través del USPS, cubra la etiqueta de FedEx con la etiqueta de envío preimpresa de USPS y deposite el sobre en cualquier buzón del USPS.